


Drempelhulp - Set 2 Montagehandleiding

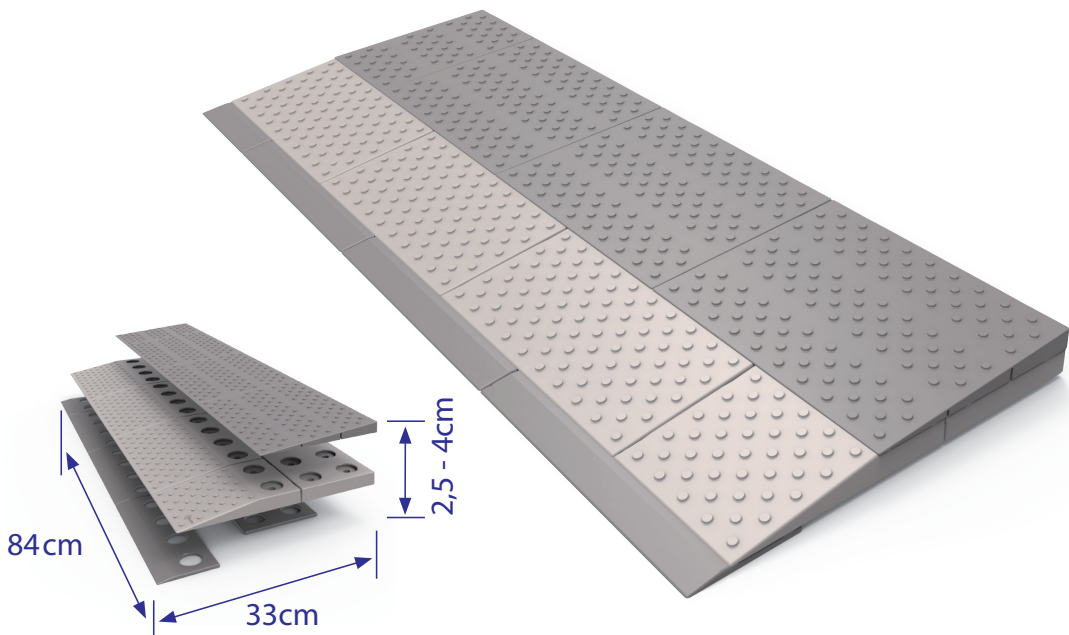

Benodigd gereedschap:




Eventueel aangevuld met een (schroef) boormachine.

Meegeleverd montagemateriaal:



Bevestigingsmateriaal, 1 slagplaatje en 3 laminaatvoeten.

Doos inhoud

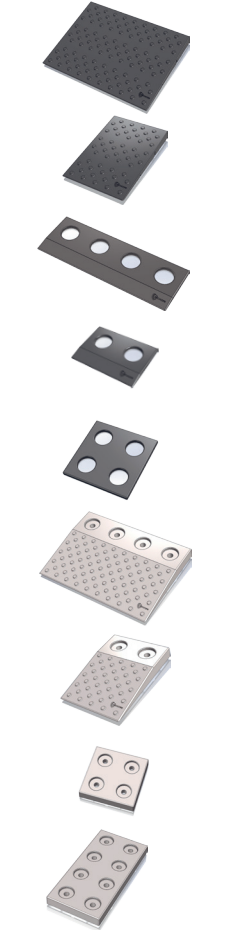

onderdeel	nummer	aantal	artikel nummer
Pastegel heel 4x3	nr. 13	3	8026.100.09
Pastegel half 2x3	nr. 14	1	8026.100.10
Connector 4x1	nr. 10	3	8026.100.11
Connector 2x1	nr. 11	1	8026.100.13
Connector 2x2	nr. 12	4	8026.100.12
Ramp heel	nr. 5	3	8026.100.06
Ramp half	nr. 7	1	8026.100.07
Tegel kwart	nr. 6	1	8026.100.05
Tegel half	nr. 3	3	8026.100.03


Optionele accessoires, niet in de doos

	Vuldop grijs		14	8025.010.02
	Vuldop bruin		14	8025.010.03
	Antislip doppen		14	8025.010.01


Montage drempelhulp

Lees de handleiding eerst goed door voordat u gaat monteren.


Leg de geleverde kunststof onderdelen op een vlakke ondergrond zoals afgebeeld.

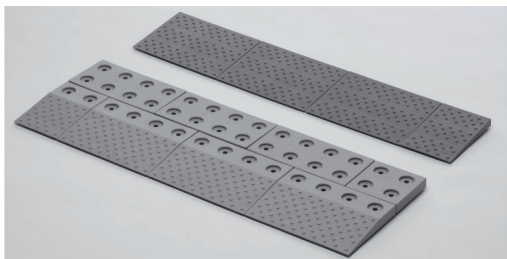


A Plaats de pastegel op de 1e laag en bepaal of de pastegel aangepast moet worden om de juiste hoogte te krijgen. (zie pagina 4)

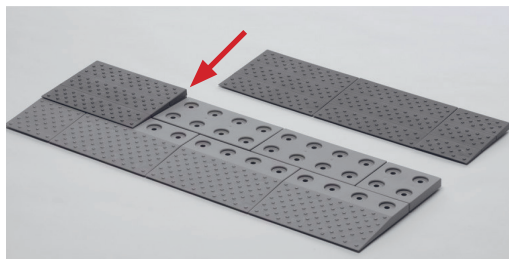

Zet na het bepalen van de gewenste hoogte (zie punt A) de SecuCare drempelhulp in elkaar. Met een stevige klap van de hamer, slaat u de eerste klikker vast. Let op: altijd het slagplaatje gebruiken. Sla in de richting zoals aangegeven op onderstaande afbeelding.

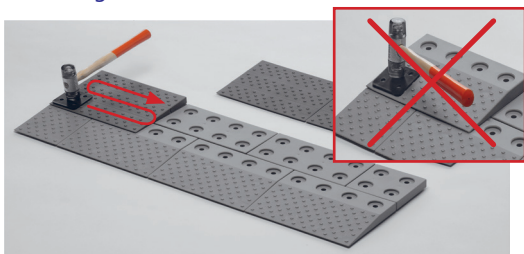

Het eindresultaat bij maximale hoogte van de set:

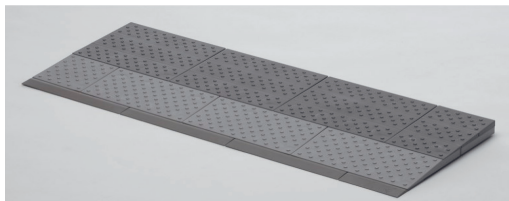

Aanpassen hoogte (punt A van vorige pagina):

Bij gebruik volledige pastegel:
Volledige max. hoogte van de set.




Bij gebruik $\frac{2}{3}$ pastegel:
Volledige hoogte minus 5mm.



Bij gebruik $\frac{1}{3}$ pastegel:
Volledige hoogte minus 10mm.



B bepaal de hoogte: Plaats de halve pastegel dwars op een tegeldeel. Met een stevige klap van de hamer (gebruik altijd het slagplaatje) slaat u deze vast. Bepaal waar u, aan de hand van de best passende hoogte, de pastegel eventueel dient in te korten. In de tegel zijn daarvoor aanwezige snijlijnen aangebracht.


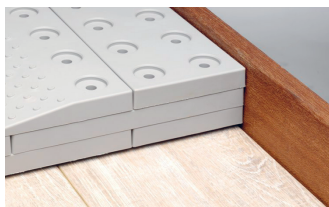


C Verwijder de halve pastegel met de meegeleverde connector schuin en kort alle pastegels in op de juiste maat.




Bevestiging op steen

Indien u de drempelhulp wil bevestigen op steen/hout dient u eerst de alle **connectoren** aan te brengen: Plaats de connectoren vierkant & langwerpig zoals op onderstaande afbeelding. U kunt deze met de hand erop drukken maar ook door het zwarte kunststof slagplaatje te plaatsen op de connector klikverbinding en deze vast te tikken met een hamer. Zorg voor een stevige vlakke ondergrond. In combinatie met de (rubber)hamer dient u altijd het slagplaatje te gebruiken.

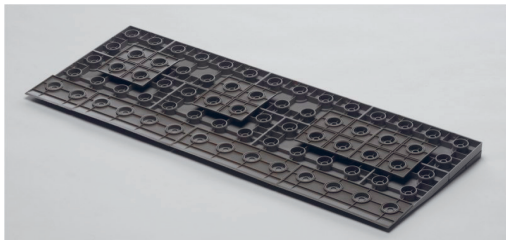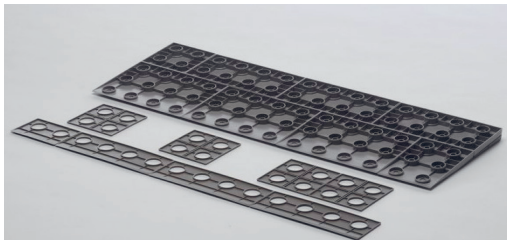


- 1** Bepaal de montage gaten en teken af.

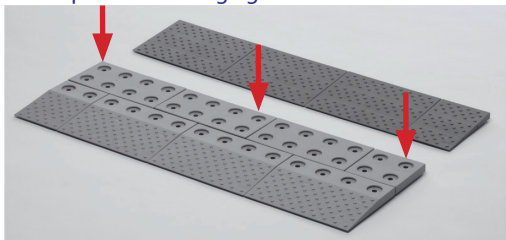

- 2** Boor (steen 6 mm) en plaats de pluggen.




- 3** Plaats nu de meegeleverde grote ringen in de eerste laag.

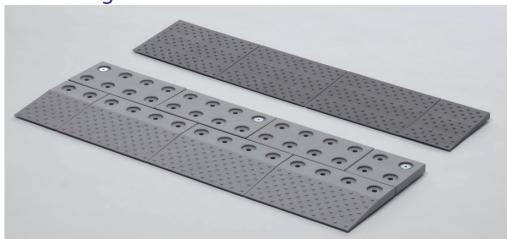

- 4** Bevestig de onderlaag m.b.v. van de meegeleverde lange schroeven.




- 5** Plaats het eerste deel van laag twee op laag 1, zie hieronder.

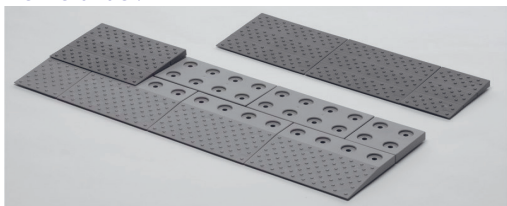

- 6** Met een stevige klap van de hamer op het slagplaatje, slaat u de eerste klikker vast. Slaan in de richting zoals aangegeven op onderstaande afbeelding.






- 7** Het eindresultaat:




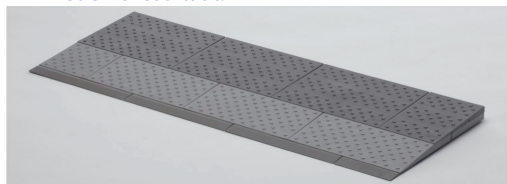


Bevestiging op een gladde ondervloer

Plaats de connectoren vierkant & langwerpig zoals op onderstaande afbeelding. U kunt deze connectoren met de hand erop drukken, maar ook door het zwarte kunststof slagplaatje te plaatsen op de connector klikverbinding en deze vast te tikken met een hamer. Zorg voor een stevige vlakke ondergrond. In combinatie met de (rubber)hamer dient u altijd het slagplaatje te gebruiken.

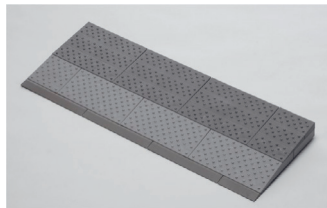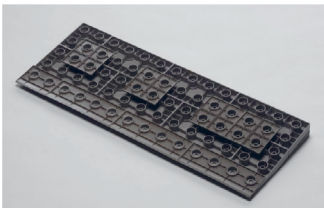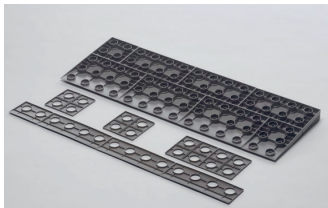

Het bevestigen van de drempelhulp op een gladde ondervloer (zoals bijvoorbeeld laminaat, of gladde tegels) kan met de meegeleverde vlakke klikvoeten. Plaats de klikvoeten en voorzie ze van de meegeleverde dubbelzijdige tape. Verwijder de schutlaag.

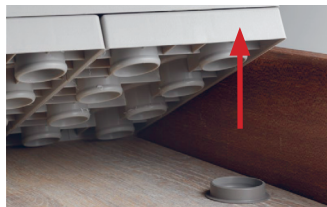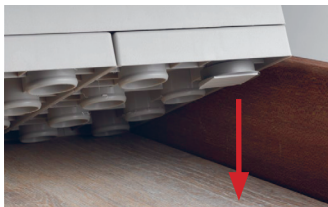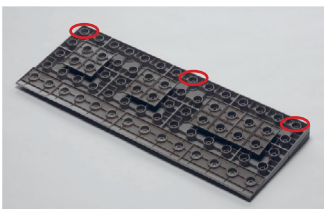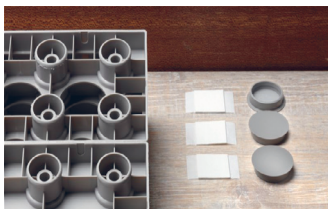

Reinig / ontvet de ondergrond grondig. Plaats nu de SecuCare drempelhulp op de juiste plek, stevig aandrukken.

Tip: voor bevestiging op een niet gladde stenen ondervloer kunt u eventueel de klikvoeten vastzetten met de meegeleverde schroeven en pluggen.



Bevestiging aan een opstaande verhoging of drempel

Bepaal waar de 3 (korte) bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbereide uitsparingen uit.



Bepaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.

Teken af op de opstaande rand/drempel, boor voor en bevestig de schroef en ring. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempel en de ring passen.

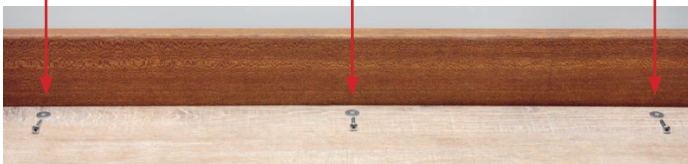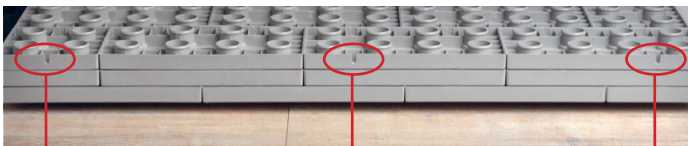

Plaats nu de drempelhulp over de schroef/ring.



Tip: De SecuCare drempelhulp is eventueel demonteerbaar. U kunt de lagen los halen van elkaar door gebruik te maken van de aanwezige schuine connector. Doe dit met beleid, gebruik geen ander soort gereedschap, daarmee kunt u de drempelhulp mee beschadigen.



Disclaimer en garantie voorwaarden - SecuCare drempelhulp

Versie 3.0 januari 2016

Belangrijk

- Lees zorgvuldig de montage instructie en disclaimer door.
- Zorg voor een stevige en vlakke ondergrond.
- Pas op voor uitgliden in bepaalde weersomstandigheden. Strooi zout in geval van ijzel of gebruik het systeem dan niet.
- Zorg ervoor dat dit systeem geen gevaar/hinder veroorzaakt (bijv. in een woning galerij).
- De omgeving dient voldoende verlicht te zijn zodat het systeem goed zichtbaar is, speciaal in een publieke omgeving en voor mensen met een zichtbeperking.

Algemene bepalingen

- Plaatsing en gebruik van de drempelhulp geschiedt op eigen risico.
- De drempelhulp is uitsluitend ontworpen voor, en geschikt voor, gebruik door personen van gemiddeld gewicht te voet, met een rollator of in een rolstoel, en derhalve voor geen enkele andere toepassing.
- De ondergrond waarop de drempelhulp wordt gemonteerd, dient vlak en stabiel en solide te zijn.
- Het systeem nooit gebruiken in de buurt van, of in combinatie met, ontvlambare materialen. Het systeem is in dat geval ook niet geschikt voor vlucht routes.
- De hellingshoek van de drempelhulp dient zo klein mogelijk te zijn. Indien de situatie ter plekke dwingt tot een steile hoek, dient de gebruiker(s) gedurig hulp geboden te worden bij gebruik van de drempelhulp.
- Indien verlagen van de drempelhulp plaatsheeft, dienen voldoende beschermende middelen (veiligheidsbril, oorbeschermers e.d.) te worden gedragen.
- Kleine onderdelen van de drempelhulp dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden, om inslikken etc. te voorkomen.
- Bij gebruik van naaldhakken wordt dringend aanbevolen het systeem uit te rusten met los leverbare anti slip doppen (art. nr 8025.010.01, 14 stuks). Hierdoor ontstaat een vlak geheel (n.v.t. bij set 1).
- Na montage en daarna van tijd tot tijd, dient te worden gecontroleerd of de drempelhulp in de situatie ter plekke stevig genoeg is voor normaal gebruik.
- De omgeving van het drempelsysteem dient gedurig voldoende verlicht te zijn, waardoor de drempelhulp goed zichtbaar is voor anderen, voor wie de drempelhulp immers een obstakel kan zijn; voor gebruik van de drempelhulp op galerijen is een drempelsysteem verkrijgbaar met schuine zijkant.
- Afhankelijk van de hoogte van het systeem is een geleide-rail (die ongelukken voorkomt) aan weerszijden van het systeem aan te raden/verplicht. Controleer uw lokale wetgeving hierop of neem contact op met uw leverancier of Secu voor meer informatie.
- Lokale regels voor het kenbaar maken van de drempelhulp dienen te worden nagekomen. In geval van gladheid van de drempelhulp, bijvoorbeeld door weersomstandigheden doch niet beperkt daartoe, dienen passende maatregelen tegen uitglijden door die gladheid genomen te worden waarbij bijvoorbeeld de drempelhulp tijdelijk kan worden verwijderd.
- Bij twijfel door de consument over enig aspect van montage of gebruik van de drempelhulp dient onverwijld contact op te worden genomen met de leverancier van de drempelhulp, van wie de consument dat heeft betrokken.

Onderhoud

- Van tijd tot tijd dient de stevigheid van de drempelhulp en van de onderlinge verbindingen te worden gecontroleerd.
- De drempelhulp en de ondergrond dient gedurig schoon te worden gehouden. Elke soort schoonmaakmiddel en zelfs een autoclaaf kan gebruikt worden ter reiniging van de drempelhulp.
- Eventueel grof vuil kan worden verwijderd met een borstel en daarna dient de drempelhulp afgespoeld te worden met water.

Garantie

Voor inroeping van garantie op de drempelhulp is overlegging van het bewijs van aankoop van de drempelhulp, voorzien van aankoopdatum en productomschrijving of productnaam, vereist. Garantie wordt gegeven voor de duur van vijf jaar gerekend vanaf de datum van aankoop van de drempelhulp door de consument. De garantie geldt uitsluitend aangaande eventuele productiefouten van de in de drempelhulp gebruikte materialen. Een terecht beroep op garantie leidt uitsluitend tot een aanspraak op kostenloze levering door Secu aan de consument van een vervangend drempelsysteem; Secu is niet gehouden tot enige andere prestatie. Secu accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige letselschade of enige zaakschade of enige gevolgschade die ontstaat tijdens montage van de drempelhulp en/of tijdens gebruik van de drempelhulp; enige aansprakelijkheid welke desondanks voor rekening van Secu komt, is beperkt tot het bedrag dat in het bewuste geval wordt uitgekeerd door Secu's aansprakelijkheidsverzekeraar.

De garantie vervalt met onmiddellijke ingang door:

- Montage die niet conform is aan de bij de drempelhulp geleverde montageinstructie resp. geschiedt met ander dan het meegeleverde montage materiaal.
- Verkeerd, oneigenlijk of te zwaar belastend gebruik (max. belasting 850 kg/m²) van de drempelhulp.
- Opzettelijke of door verwaarlozing van de drempelhulp ontstane beschadigingen.
- Bij toepassing van de drempelhulp op een oneffen en/of instabiele en/of onvoldoende solide ondergrond.
- Beschadigingen veroorzaakt door gebrek aan onderhoud, door verkeerd onderhoud of door gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen (zie reinigingsadvies).
- Invloed van chemische/elektrochemische stoffen en/of invloed van elektriciteit.

Wijzigingen voorbehouden.

SecuCare is een merk van SECUPRODUCTS BV
Luzernestraat 29 - 2153 GM Nieuw-Vennep - NL
Tel. +31-252-620901 - info@secu.nl - www.secu.nl

